



Moocall

CALVING SENSOR



User Guide

Gebruikershandleiging / Guide de l'Utilisation /
Guida dell'Utente / Benutzerhandbuch / Manual del usuario /
Podręcznik użytkownika / Használati útmutató / Guia do usuário



Merci d'avoir choisi Moocall

Chez Moocall nous le sommes très fiers de nos produits et nous espérons que vous serez aussi satisfait de votre capteur de vêlage que nous sommes.

Nous attendons avec impatience que vous assistiez à de nombreux vêlages réussis en toute sécurité !

Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter ! Envoyez-nous un email à help@moocall.com, discutez avec nous en ligne sur le site www.moocall.com ou contactez-nous aux numeros ci dessus:

Bien cordialement,

L'équipe de Moocall



09 70 73 43 77



438-238-0123



+353 1 969 6038



www.facebook.com/moocall



www.instagram.com/moocallofficial



@moocallsensors



@moocallsensors

Étape 1: Activer votre capteur de vèlage Moocall

Pour utiliser votre nouveau capteur de vèlage Moocall, vous devez d'abord l'activer en ligne.

Connectez-vous sur www.moocall.com/register pour finaliser l'activation.

Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez-nous pour activer votre capteur.



09 70 73 43 77




438-238-0123



+353 1 969 6038

Si le capteur n'a pas été activé, il s'éteindra juste après avoir été allumé.

Étape 2: Ajuster le revêtement en caoutchouc

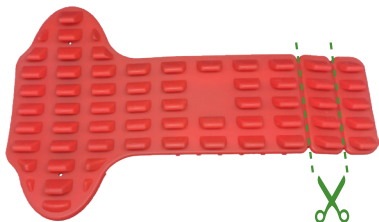


Le revêtement en caoutchouc peut être coupé selon la taille des queues des vaches de votre troupeau. Pour des queues fines, les deux segments; pour des queues de taille moyenne, coupez un segment, et pour des queues épaisses, ne coupez rien du caoutchouc.

Si les vaches de votre troupeau ont des queues avec différentes épaisseurs, contactez Moocall pour acheter des caoutchoucs supplémentaires.

Étape 3: Charger le capteur

Pour charger votre capteur de vélage Moocall, retirez le revêtement en caoutchouc pour libérer le capot du chargeur, retirez le capot et insérez le câble de charge comme illustré.

Une fois le chargement terminé, remplacez le capot puis le revêtement en caoutchouc.

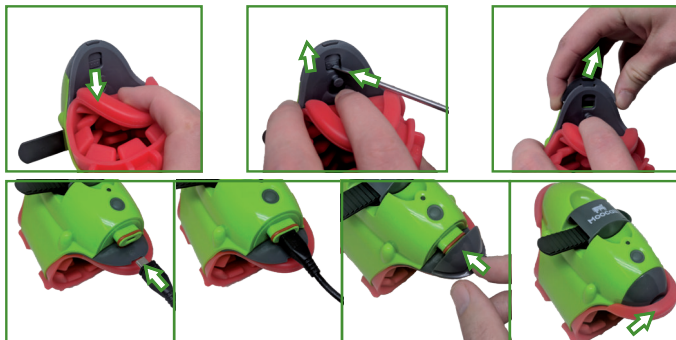


IMPORTANT: Assurez-vous que le capot du chargeur est sec avant de le replacer sur le capteur, pour être sûr d'une bonne étanchéité.

NE PAS forcer le câble USB dans le port de charge du capteur.

Étape 4: Allumer le capteur

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ quatre secondes. La lumière sur le capteur clignotera plusieurs couleurs jusqu'à clignoter en bleu toutes les 4-5 secondes, indiquant que le capteur est allumé et actif.

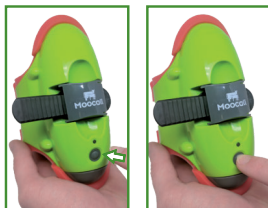

Maintenez le bouton enfoncé pendant dix secondes pour éteindre le capteur.

Indicateur lumineux



 Capteur allumé et prêt à l'emploi

 Batterie complètement chargée

 Test en cours

 Batterie faible

 Vélage en cours

 →  Mise à jour du logiciel en cours

 →  →  →  Capteur en cours de connexion

Le capteur vous enverra un message lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 15%.

Étape 5: Tester le capteur

Veuillez effectuer ce test dans la zone où le capteur sera utilisé, pour vous assurer que la couverture de votre réseau est suffisante pour que le capteur fonctionne.

Si vous ne recevez pas de message dans les dix minutes suivant l'exécution de ce test, contactez le service client Moomall.

Si le capteur ne se met jamais à clignoter en bleu et s'éteint après avoir clignoté plusieurs couleurs pendant quelques minutes, soit vous devez activer votre capteur, soit vous pouvez avoir un problème de couverture réseau mobile dans votre zone. Contactez le Service client de Moomall.



Assurez-vous que le capteur est allumé et que la lumière bleue clignote



Appuyez fermement sur le bouton pendant une demi-seconde



Relâchez et appuyez rapidement à nouveau sur le bouton



Le capteur devrait commencer à clignoter en vert, indiquant que le test est en cours

Si le voyant vert ne commence pas à clignoter lors de la deuxième pression, assurez-vous d'appuyer fermement sur le bouton et réessayez. Vous recevrez un SMS sur tous les numéros connectés au capteur, un E-mail et un message de notification via l'application Moomall, si vous l'avez installée.

N'appuyez sur le bouton qu'avec votre doigt, n'utilisez aucun outil car cela pourrait endommager le bouton et l'électronique à l'intérieur.

Étape 6: Ouvrir le fermoir

Soulevez le cliquet noir pour ouvrir le fermoir MooCall et poussez le cliquet tout au fond vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche, en vous permettant de desserrer la sangle.



Étape 7: Placer le capteur sur la queue

Placez le capteur sur la queue d'une vache près du vêlage. Le capteur doit être placé sur la queue en face de la vulve.



Insérez la sangle crantée dans le cliquet.



Fermez le cliquet et appuyez sur le fermoir. Tirez l'extrémité libre de la sangle crantée jusqu'à ce que le capteur soit fixé sur la queue de la vache.

Assurez-vous que le capteur est bien fixé sur la queue en testant l'ajustement. Le capteur devrait pouvoir se déplacer d'un côté à l'autre, mais pas vers le bas sur la queue. Ajustez l'étanchéité de la sangle au besoin jusqu'à ce qu'un ajustement correct soit obtenu.

Démonstration vidéo disponible sur www.moocall.com/guide-d-utilisation



IMPORTANT! NE PAS TROP SERRER! Si le capteur est trop serré sur la queue, vous recevrez de fausses alertes et vous risquez de causer des dommages permanents et irréversibles à la vache!

NOTE: Assurez-vous que votre revêtement en caoutchouc a été ajusté à la taille de la queue de votre vache. L'utilisation d'un caoutchouc de mauvaise taille peut gêner l'animal et générer de fausses alertes du capteur.


Étape 8: Vérifier l'ajustement du capteur sur la queue

Une fois que le capteur de vélage Moocall est placé sur la queue, assurez-vous que le revêtement en caoutchouc ne se détache pas de la sangle crantée, pour éviter que la sangle frotte sur la queue ou que le caoutchouc même se plie ou se chevauche avec le boîtier en plastique.




Moocall SMS d'alerte


Voilà les SMS d'alerte que le capteur de vêlage Moocall enverra sur votre téléphone.

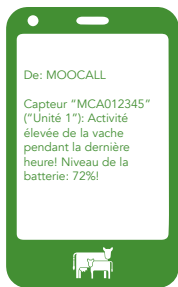


Première alerte

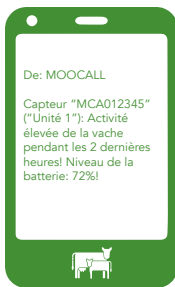


Deuxième alerte

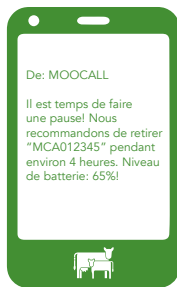

Temps d'arrêt

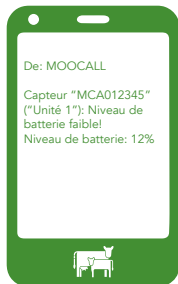

Alerte batterie faible

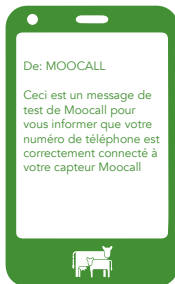


SMS Test



Message hors-queue

Tableau de bord MyMooCall

Accédez au tableau de bord MyMooCall via www.moomoocall.com

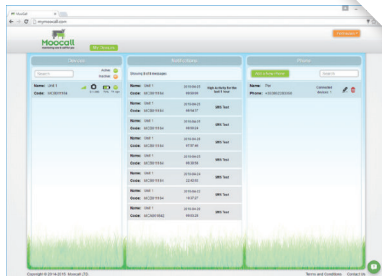

Lorsque vous enregistrez votre capteur MooCall, vous choisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le tableau de bord MyMooCall. Ici vous pouvez voir l'état de tous vos capteurs dans le panneau de gauche, et toutes les alertes envoyées dans le panneau central. Vous pouvez gérer les numéros dans le panneau de droite et vos alertes e-mail, le fuseau horaire et les paramètres de langue dans le menu déroulant de votre nom d'utilisateur, en haut à droite.



L'application MooCall Breedmanager est disponible pour les appareils Android et iOS. Cherchez "MooCall" dans votre App Store et installez-la. Connectez-vous à l'application avec le même nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre tableau de bord MyMooCall.

L'application vous donne accès aux mêmes fonctions que vous avez dans le tableau de bord MyMooCall et bien plus encore : un outil de gestion de troupeau, des notifications qui font sonner votre téléphone en plus des textos, le forum Q&A et plus encore. L'application MooCall fonctionne avec le wifi. En plus des alertes SMS que vous recevez sur votre ligne mobile, chaque SMS est doublé par une notification envoyée par l'application afin de vous assurer de ne jamais manquer une alerte en cas de faible signal mobile.

Étape 9: Retirer le capteur

Retirez le capteur lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Soulevez le cliquet noir pour ouvrir le fermoir Mocoall et poussez le cliquet tout au fond vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche et desserrez la sangle.



Étape 10: Nettoyer le capteur

Nettoyez doucement avec une brosse sèche ou un chiffon humide. Nettoyer toujours le capteur après chaque vêlage.




REMARQUE: NE PAS immerger le capteur dans l'eau ou d'autres liquides!

ATTENTION! NE PAS NETTOYER LE CAPTEUR SANS QUE LE CAPOT DE CHARGEUR SOIT EN PLACE

Étape 11: Réinitialiser le capteur

Après un vêlage, appuyez sur le bouton pendant une seconde pour réinitialiser. La lumière rouge fixe passe à bleue clignotante et le capteur est maintenant prêt à être placé sur la prochaine vache. Le capteur se réinitialisera automatiquement après une heure, s'il n'est pas réinitialisé manuellement. Pour éteindre le capteur, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant dix secondes.

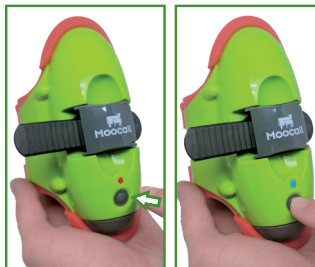

Informations supplémentaires sur le capteur

IMPORTANT!

Le capteur Moocall est conçu pour offrir une aide précieuse aux éleveurs pendant la saison des vêlages. Il n'est pas garanti de prédire chaque vêlage!

Des niveaux raisonnables de supervision directe ou par caméra doivent être maintenus pendant les périodes de vêlage.

Il est recommandé que les éleveurs utilisent leur propre expérience et connaissance du troupeau pour assurer la meilleure performance du capteur. Par exemple, si le capteur est placé sur une vache très mature, qui peut vêler en temps rapides, ou sur une vache qui ne présente pas les niveaux normaux de détresse ou de douleur avant le vêlage, le capteur pourrait ne pas envoyer le SMS d'alerte au téléphone portable de l'éleveur.

Serrez le capteur en ajustant le degré de resserrement de la sangle pour éviter que le capteur tombe de la queue; si le capteur est trop serré, il peut gêner l'animal et cela peut causer des fausses alertes.

Si la vache n'a pas vêlé dans les quatre jours suivant la pose du capteur sur la queue, veuillez retirer l'unité de la queue pendant 3-4 heures avant de la placer à nouveau, pour éviter tout risque de gêner l'animal.

Les capteurs Moocall sont capables de détecter un vêlage précoce, même si cela n'est pas forcément visible par l'éleveur. S'il vous plaît, veuillez surveiller régulièrement votre vache après la réception des messages d'alerte.

Le comportement des vaches diffère considérablement d'une vache à l'autre. Les capteurs Moocall prédisent un pourcentage très élevé de vêlages (environ 95%). Moocall Ltd ne prend pas la responsabilité pour les vêlages ratés parce que détectés avec un court préavis ou sans préavis par textos.

Le capteur de vêlage Moocall a été conçu uniquement pour les bovins. S'il vous plaît ne pas utiliser le capteur sur d'autres animaux.

Visitez www.moocall.com/user-guide pour vidéos et informations

Maintenance de la batterie

Afin de préserver la durée de vie de la batterie et la longévité du capteur, après la saison de vèlage, rechargez la batterie avant de ranger le capteur.

REMARQUE: CHARGEZ LA BATTERIE ENTIÈREMENT AVANT DE RANGER LE CAPTEUR!

Composants du capteur

Chargeur



Adaptateur AU/NZ



Adaptateur US



Adaptateur EU



Câble de charge



Capot du chargeur



Sangle



Écrou et vis



Cliquet réglable



Revêtement en caoutchouc



Fermeir



Mes capteurs de vêlage Moocall

Écrivez ici vos numéros MC- et IMEI des capteurs Moocall:

MC-numéro:

IMEI-numéro:

MyMoocall identifiant

Écrivez vos MyMoocall identifiants ici:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

www.mymoocall.com

Contactez Moocall

Notre Service à la clientèle est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les produits Moocall.

Nous sommes joignables de différentes manières:

Par téléphone:



09 70 73 43 77



438-238-0123



+353 1 969 6038

Par e-mail:

help@moocall.com

Web:

www.moocall.com

Facebook:

www.facebook.com/moocall

Twitter:

www.twitter.com/moocallsensors

Un service de messagerie instantanée est disponible sur www.moocall.com, www.mymoocall.com, sur notre page Facebook www.facebook.com/moocall et dans l'application Moocall Breedmanager.

Par courrier:

Moocall Ltd

Irish Farm Centre

Naas Road

Bluebell D12 YXW5

Co. Dublin

Ireland

Moocall est une marque déposée

Termes et conditions Moocall: Vous reconnaissez et acceptez que l'achat et / ou l'utilisation du capteur de vélage Moocall ("L'appareil") soit régi par les conditions standard et les conditions d'approvisionnement de Moocall qui peuvent être trouvées sur [<http://moocall.com/terms>] (CGV). L'achat et / ou l'utilisation de l'appareil par vous constitue une acceptation des conditions générales de vente et une reconnaissance que vous avez lu et compris ces CGV.